



PARTNER D'ECCELLENZA

DISTRIBUTORE UNICO
AUTORIZZATO PER L'ITALIA



OFFICIAL WORLD DISTRIBUTOR

MESORGA

Mesorga S.r.l.

via Vetere, 14 - 20129 Milano (MI)

www.mesorga.eu



Aerazen Lab S.r.l.

Viale Majno, 34 - 20129 Milano - Italia

info: +39 392 97 46 341 - info@aerazenlab.it - www.aerazenlab.it



PARTNER D'ECCELLENZA

DISTRIBUTORE UNICO
AUTORIZZATO PER L'ITALIA

PRESENTS

DEJALE

acido ialuronico biorivitalizzante
hyaluronic acid biorevitalizing

40 mg

THE ULTIMATE GENERATION OF BIOSTIMULATING INTRADERMAL GEL

LA BIOSTIMOLAZIONE

La Biostimolazione è un trattamento finalizzato al miglioramento dell'aspetto estetico della zona trattata attraverso la stimolazione delle strutture deputate al mantenimento del trofismo, dell'elasticità e del tono dei Tessuti.

Il trattamento prevede l'introduzione nella cute di frammenti di acido ialuronico (20-38 monomeri) per attivare i cd 44 dei fibroblasti. Il fibroblasto attivato è stimolato a produrre i componenti della matrice del derma.

Ridare la naturale morfologia della cute tonificando le zone tossiche e donando freschezza espressiva.

DEJALE SPIEGAZIONE

È un Biostimolante a base di acido ialuronico **ad alto e basso peso molecolare**, prodotto da batteri Streptococcus equi, formulato ad una concentrazione di 40mg/2ml in un tampone fisiologico, sterile, biodegradabile e isotonico.

DEJALE COMPOSIZIONE

- una siringa contiene 2,0 ml di gel apirogeno, sterilizzato con calore umido
- purezza massimo grado
- peso molecolare circa 1,6 milioni di Dalton (valore medio)

DEJALE CONTENUTO CIASCUNA SCATOLA

- una siringa di DEJALE
- due aghi sterili monouso da 30G 1/6", destinati all'iniezione di DEJALE
- un foglio illustrativo DEJALE

DEJALE INDICAZIONI

È indicato nel processo fisiologico dell'invecchiamento della pelle, tra i cui effetti si annoverano:

- l'ispessimento dello strato corneo (ruvidità e minore luminosità della pelle, discromie) e l'alterazione del derma (rughe)
- nel processo di riparazione del tessuto dermico
- nei casi di esiti cicatriziali in seguito a traumi cutanei superficiali (es. cicatrici da acne e smagliature)

Tale trattamento può essere applicato sul viso e a qualsiasi altra parte del corpo che si voglia trattare. Ha lo scopo di:

- migliorare l'idratazione della pelle
- migliorare l'elasticità ed il turgore della pelle
- migliorare matrice extra cellulare (ECM)

DEJALE PROTOCOLLO

- una seduta ogni 7-15 giorni o tutti i mesi in funzione dell'invecchiamento cutaneo
- da 6 a 10 sedute all'anno da ripetersi ogni anno

DEJALE POSOLOGIA

- 1-2 siringhe per seduta 0,05-0,1 cc per ponfo

TECNICHE INIETTIVE PIÙ ESEGUITE:



Fan Technique



Cross-hatching Technique



Retrotracing



Nappage



Point by Point



Five Point



DEJALE CONTROINDICAZIONI

- soggetti atopici Eczema
- herpes
- infezioni cutanee

DEJALE EFFETTI SECONDARI

- arrossamento cutaneo momentaneo
- edema Petecchie
- piccoli ematomi da traumatismo da ago

DEJALE STABILITÀ

Il prodotto è stabile a temperatura ambiente 8°/25° ed essendo sterilizzato a calore umido, la distribuzione del peso molecolare medio della soluzione è invariato.

La variazione stabile del peso molecolare all'interno della soluzione contribuisce alla stabilità generale del prodotto.

DEJALE CONCLUSIONI

- migliora la compattezza della pelle ristrutturando la matrice extracellulare
- favorisce l'attività dei fibroblasti con formazione di nuove fibre di collagene ed elastina
- idratazione profonda
- azione Scavenger sui radicali liberi
- limita la cheratosi attinica
- prolunga la neoangiogenesi